

対面式小型パネルループ SML001

取扱説明書

この機器は、音声聞き取りにくくなった高齢者、難聴者のためにアンテナから磁気誘導により音声信号を送ることで、補聴器、磁気ループ専用受信機を装着した人のみに音声を伝えることが出来る商品です。

音響設備の使えない狭小なスペースでも、対象の方に音声を拡張して伝えることが出来るので少人数での打合せや、プライバシーの気になる窓口等での利用に最適です。

1. はじめに

本機器を構成するセットが、全てあるかご確認下さい。

セット内容



ループアンテナパネル

額縁型のアンテナです。利用者(難聴者)の方に向けてご利用下さい。
(額縁としても利用可能ですので、告知物などを入れて使用できます。)

ACアダプター

電源用のアダプターです。

アンテナ用スタンド

アンテナパネルを立てるのにご利用下さい。

アンプ



小型パネルループ用のアンプです。

マイク

アンプに接続して利用します。
このマイクから入力された音声
が拡張されます。

2. セットの手順

① スタンドの組み立て

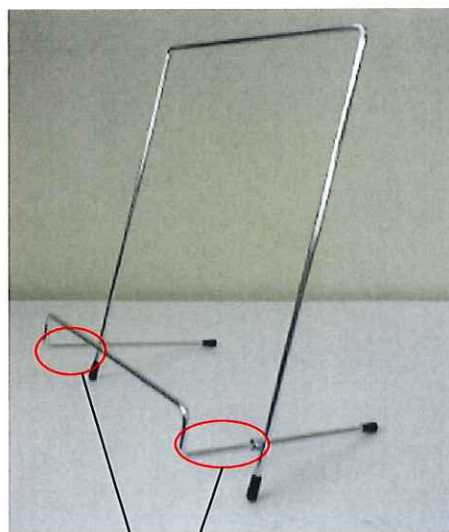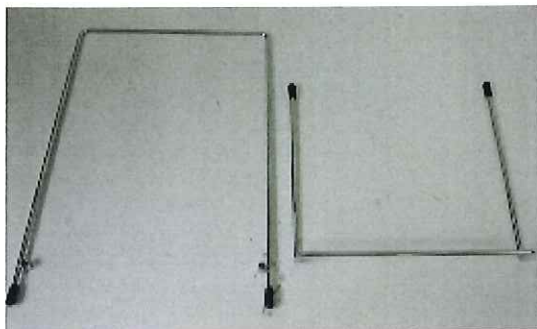

長さが均一になると
ガタつき無く安定します。

② アンテナパネルの設置



アンテナパネルが倒れないよう
確実に設置して下さい。

③機器の接続

パネルアンテナ



ACアダプター



コンセントに
接続して下さい。

マイク



アンプ後背部



ピンマイクとしても
ご利用頂けます。



写真のように、それぞれの線を
所定のコネクタに接続して
下さい。
(差込口がそれぞれ異なり、違う
線は刺さらないようになって
います。)

3. 操作の手順

機器を全て接続すると、以下ようになります。

①アンプのスイッチバーを上げてオンにしてください。



アンプ正面部



スイッチがオンになると
LEDライトが点灯します。

②マイクに音声入力(話す等)してください。

また、パネル(アンテナ)から1.5m以内で補聴器又は受信機を使い、音量を確認してください。

- コネクタの抜き差しは正しい方法で行なって下さい。
無理に押し込んだり、ケーブルを持って引っ張ったりしないで下さい。
- 補聴器で電話マーク (Tマーク) の付いた誘導コイル付のものはご利用頂けます。
(補聴器のスイッチをTマークに合わせてご使用下さい)